

Jak dezaktywować urządzenie, aby mankiety były opróżnione w trakcie implantacji.

Zwieracz został właściwie napełniony i jest gotowy do dezaktywacji przed wszczepieniem.

PRZYGOTOWANIE MANKIETU DO IMPLANTACJI/DEZAKTYWACJI

Mankiet jest opróżniony i musi być pusty w czasie implantacji.

KROK 1 NACISNUJ I PUŚĆ PRZYCISK POMPKI DO MOMENTU AŻ MANKIET OPRÓŻNI SIĘ, A SPRĘŻYNA BĘDZIE CAŁKOWICIE ŚCIŚNIĘTA

KROK 2 ZDEJMUJ KCIUK Z PRZYCISKU POMPKI

KROK 3 SPRAWDŹ, CZY SPRĘŻYNA JEST W PEŁNI ŚCIŚNIĘTA I ZNAJDUJE SIĘ NA POZIOMIE ZNAKU MINUS „-”


KROK 4 ZDECYDOWANYM RUCHEM NACISNUJ PRZYCISK DEZAKTYWACYJNY ZANIM SPRĘŻYNA ZACZNIE SIĘ ROZPRĘŻAĆ

KROK 5 POCZEKAJ 20 SEK. SPRAWDŹ CZY SPRĘŻYNA POZOSTAJE W PEŁNI ŚCIŚNIĘTA I ZNAJDUJE SIĘ NA POZIOMIE ZNAKU MINUS „-”

Rysunki poniżej pokazują jak dezaktywować urządzenie przed implantacją



1a

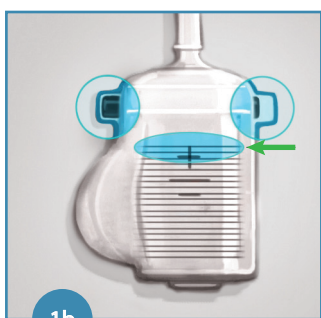


1b


**NASZYM CELEM
JEST OPRÓŻNIENIE MANKIETU
I DEZAKTYWACJA ZSI 375 PF,
ABY MANKIET POZOSTAŁ PUSTY**

Wypełniony mankiety
(zwieracz aktywowany)

Sprężyna rozprężona
(zwieracz aktywowany)

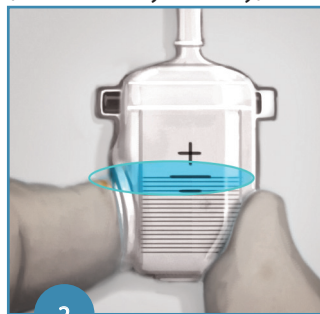


2

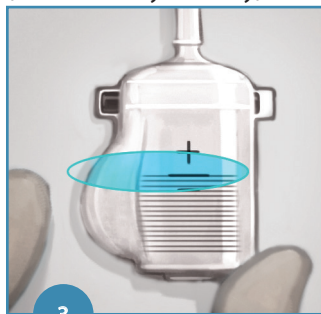

3


Naciśnij przycisk pompy.
Roztwór soli fizjologicznej
przemieści się z przycisku
pompy do zbiornika.

Puść przycisk pompy.
Roztwór soli fizjologicznej
przemieści się z mankieta
do przycisku pompy.

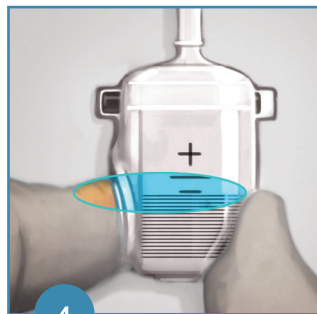


4

Potwórz procedurę
naciskając ponownie
przycisk pompy.

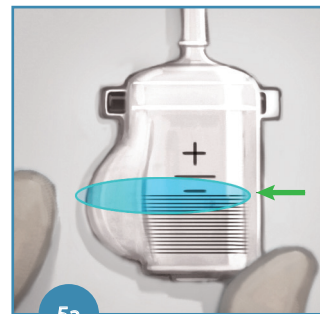

5a

Kiedy sprężyna jest w pełni
ściśnięta nie będziesz mógł
ponownie nacisnąć
przycisku pompy.

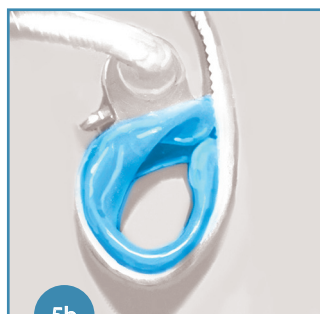


5b

Mankiet jest w pełni
opróżniony.



6

Kiedy sprężyna będzie
na poziomie znaku minus „-” puść
przycisk pompy
i zdecydowanym ruchem naciśnij
przycisk dezaktywacyjny.

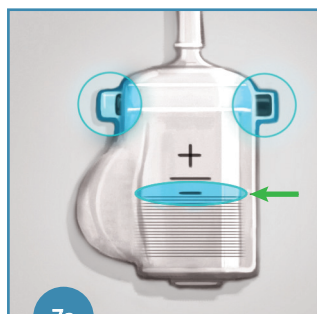

7a

Mankiet jest pusty.
Sprężyna jest na poziomie
znaku minus „-”. Oczekaj
20 sek. i sprawdź czy ZSI 375 PF
pozostaje dezaktywowany.



7b

Mankiet powinien być
opróżniony.

Jak dezaktywować urządzenie, aby mankiety był opróżniony po implantacji.

Mankiet jest wszczepiony, zwieracz został aktywowany do testowania, sprężyna jest we właściwej pozycji

DEZAKTYWACJA PO WSZCZEPIENIU MANKIETU

KROK 1 NACIŚNIJ I PUŚĆ PRZYCIŚK POMPKI DO CHWILI, AŻ SPRĘŻYNA BĘDZIE W PEŁNI ŚCIŚNIĘTA


KROK 2 ZDEJMIJ KCIUK Z PRZYCIŚKU POMPKI

KROK 3 SPRAWDŹ, CZY SPRĘŻYNA JEST W PEŁNI ŚCIŚNIĘTA I JEST NA POZIOMIE ZNAKU MINUS „-”


KROK 4 ZDECYDOWANYM RUCHEM NACIŚNIJ PRZYCIŚK DEZAKTYWACYJNY

KROK 5 POCZEKAJ 20 SEK. SPRAWDŹ CZY SPRĘŻYNA ZOSTAJE W PEŁNI ŚCIŚNIĘTA I ZNAJDUJE SIĘ NA POZIOMIE ZNAKU MINUS „-”

Kolejne rysunki pokazują jak dezaktywować zwieracz przed wszczepieniem.

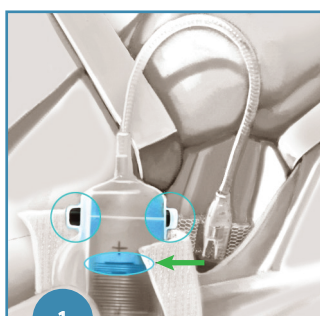



Mankiet jest wszczepiony wokół cewki moczowej. Zwieracz jest aktywowany i gotowy do testowania.

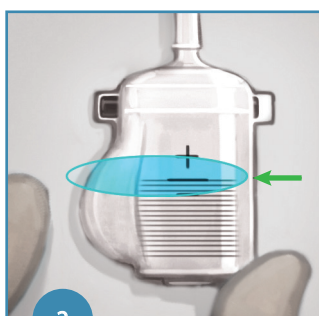

Sprężyna jest na poziomie linii środkowej. W urządzeniu panuje właściwe ciśnienie. Zwieracz jest gotowy do dezaktywacji.




Naciśnij i puść 1 lub 2 razy. Sprężyna powinna być w pełni ściśnięta, a mankiety pusty. Musimy opróżnić mankiety i dezaktywować ZSI 375 PF, aby mankiety pozostały puste w okresie gojenia po zabiegu.

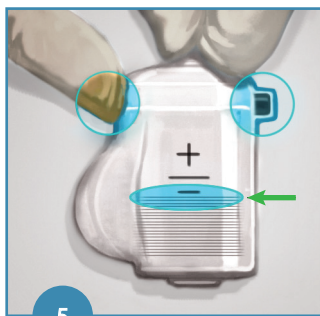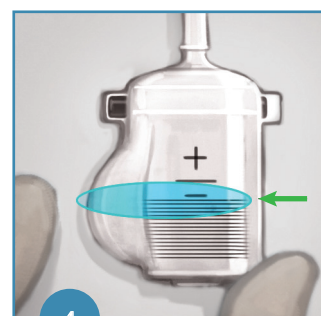

Kiedy sprężyna osiągnie znak minus „-” puść przycisk pompki i zdecydowanie naciśnij przycisk dezaktywacyjny.

**ZWIERACZ JEST
DEZAKTYWOWANY**

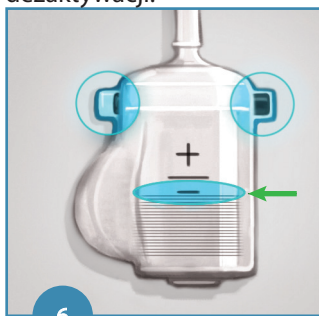

Sprężyna znajduje się poniżej znaku „-”. odczekaj 20 sek, aby upewnić się, że zwieracz jest właściwie dezaktywowany.

**ZWIERACZ JEST WŁAŚCIWIE
DEZAKTYWOWANY**

**MANKIET JEST OPRÓŻNIONY.
ZWIERACZ JEST WŁAŚCIWIE
DEZAKTYWOWANY.
TERAZ MOŻESZ WSZCZEPIĆ POMPKE,
WSZYĆ SKRZYDEŁKA ZWIERACZA
I ZASZYĆ RANĘ.**

To jest prawidłowe, że przycisk pompki jest napełniony, kiedy zwieracz jest dezaktywowany.

