

15 kolejnych kroków, które muszą być wykonane i przestrzegane w trakcie wszczepiania ZSI 375 PF

1. WPROWADŹ CEWNIK FOLEYA NR 16
2. WYPREPARUJ CEWKĘ
3. PRZYGOTUJ FABRYCZNIE NAPEŁNIONY ZWIERACZ ZSI 375 PF
4. DEZAKTYWUJ ZWIERACZ
5. ZAŁÓŹ I ŚCIŚLE DOPASUJ MANKIET DO CEWKI MOCZOWEJ
6. ZSZYJ MANKIET
7. USUŃ CEWNIK FOLEYA NR 16
8. AKTYWUJ ZWIERACZ
9. SPRAWDŹ POŁOŻENIE SPRĘŻYNY. W RAZIE POTRZEBY
WSTRZYKNIJ WYMAGANĄ OBJĘTOŚĆ SOLI FIZJOLOGICZNEJ
10. DEZAKTYWUJ ZWIERACZ
11. WPROWADŹ POMPKE DO MOSZNY
12. WPROWADŹ CEWNIK FOLEYA NR 12 NA 24 GODZINY
13. ZASZYJ TKANKI
14. PRZYKLEJ NAKLEJKI IDENTYFIKACYJNE, DOŁĄCZONE DO
OPAKOWANIA NA FORMULARZU PACJENTA
15. WYŚLIJ WYPEŁNIONY FORMULARZ PACJENTA WRAZ Z NAKLEJKAMI
IDENTYFIKACYJNYMI DO MEDICO SYSTEMS

To jest uzupełniająca lista kontrolna do procedur opisanych w Instrukcji na salę operacyjną.