


ROZWIĄZANIE PROBLEMU NIETRZYMANIA MOCZU U MĘŻCZYZN

ZSI 375 PF **SZTUCZNY ZWIERACZ CEWKI MOCZOWEJ (AUS)** **FABRYCZNIE NAPEŁNIONY**

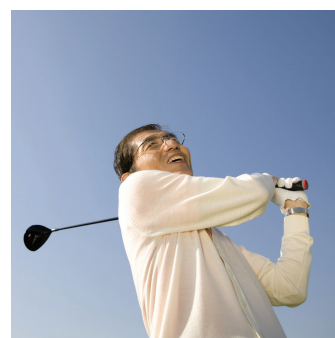

REGULOWANY MANKIET: UNIWERSALNY ROZMIAR

Więcej informacji na: www.zephyr-si.com
www.zwieracze.pl

ZEPHYR Surgical implants posiada certyfikat ISO 13485 : 2004
Sztuczny zwieracz cewki moczowej (AUS) ZSI 375 PF posiada certyfikat CE.

DYSTRYBUTOR W POLSCE:

MEDICO SYSTEMS
ul. Droga Męczenników Majdanka 119
20-325 Lublin
tel: 81 710 40 00
e-mail: med@medicosystems.pl
www.zwieracze.pl



Ulotka, wersja polska
wersja 1 - wrzesień 2015

ZEPHYR Surgical Implants


Route des Jeunes 4
1227 Acacias (Geneva)
SWITZERLAND
Email: contact@zephyr-si.com
www.zephyr-si.com



Swiss Made



REGULOWANY MANKIET OD 3.75 DO 5 cm

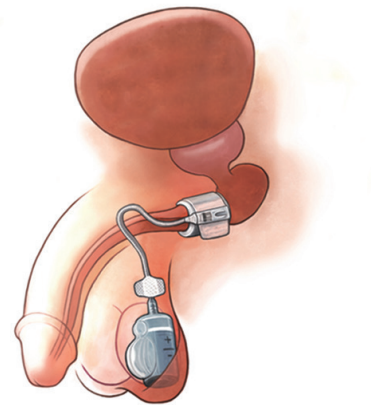

- 1 ZSI 375 PF
- 2 IGŁA TYPU HUBER

- 1 ZWIERACZ JEST AKTYWOWANY KIEDY PRZYCIŚK (▼) WYSTAJE PO STRONIE PRZYCIŚKU POMPKI



- 2 PRZEGRODA ZBIORNIKA WYRÓWNAWCZEGO

- 3 ZBIORNIK REGULUJĄCY CIŚNIENIE

- 4 PRZYCIŚK POMPKI DO OPRÓŻNIANIA MANKIETU (NACIŚNIJ – PUŚĆ)




- 5 ZWIERACZ JEST DEAKTYWOWANY KIEDY PRZYCIŚK (▼) WYSTAJE PO PRZECIWNEJ STRONIE NIŻ PRZYCIŚK POMPKI.




- 6 POMPKA

- 7 SKRZYDEŁKA DO PRZYSZYCIA ZWIERACZA ZSI 375 PF DO WEWNĘTRZNEJ TKANKI MOSZNY

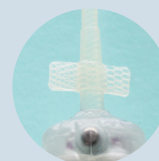


- 8 REGULOWANY MANKIET OD 3,75 DO 5 CM W Kształcie OPASKI

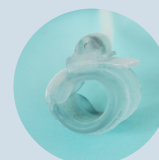


- 9 PRZEGRODA UKŁADU HYDRAULICZNEGO


WYKONAJ ZDJĘCIE RTG MOSZNY ABY SPRAWDZIĆ POZYCJĘ SPRĘŻYNY

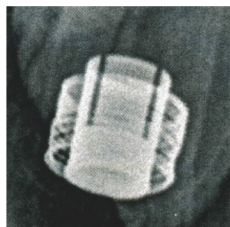

Sprężyna jest w pełni ściśnięta. Znajduje się poniżej górnej krawędzi cylindra.
Zwieracz ZSI 375 PF jest dezaktywowany.

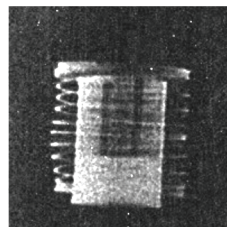

Sprężyna jest w prawidłowej pozycji. Znajduje się na wysokości górnej krawędzi cylindra.
Zwieracz ZSI 375 PF jest aktywowany.

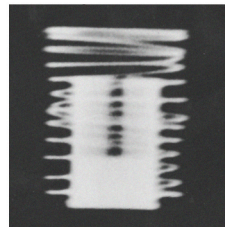


Sprężyna jest zupełnie rozprężona. W układzie hydraulicznym jest zbyt mało płynu.

MOŻLIWOŚĆ ZWIĘKSZENIA WYTWARZANEGO CIŚNIENIA




DZIAŁANIE


- Krok 1**
Mankiet jest napelniony. Cewka moczowa jest zaciśnięta. Pacjent trzyma mocz.

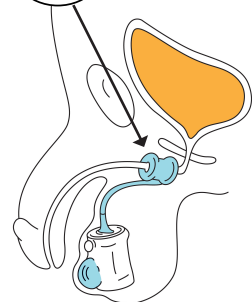

- Krok 2**
Kiedy pacjent chce oddać mocz, naciska i zwalnia przycisk pompki znajdujący się w mosznie.

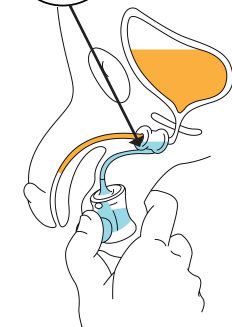

- Krok 3**
Mechanizm wyciąga płyn z mankieta, zmniejszając ciśnienie wokół cewki moczowej. Pacjent oddaje mocz. Pęcherz opróżnia się.

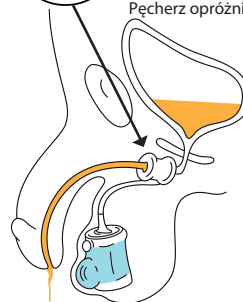

- Krok 4**
W ciągu 2-3 minut mankieta wypełnia się automatycznie. Pacjent znów trzyma mocz.

